

Microdacyn₆₀[®] Wound Care



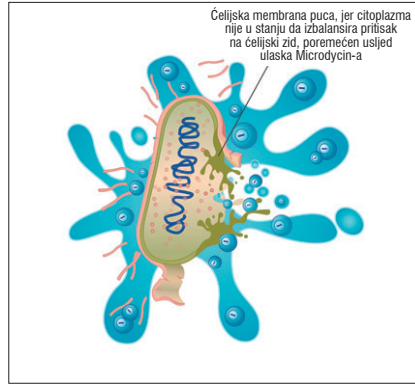
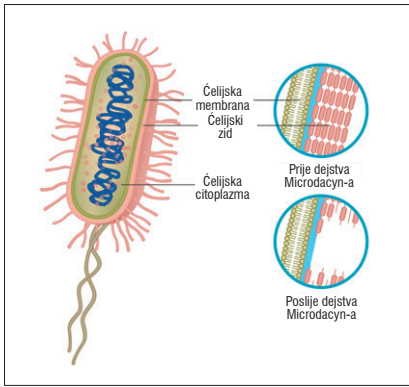

OCULUS
Innovative Sciences

Microdacyn™ je superoksidisani vodeni rastvor / hidrogel natrijum hipohlorita i hipohlorne kiseline koji se koristi za ispiranje, vlaženje i debridman akutnih i hroničnih rana kao što su: dekubitalne rane, venski ulkusi, dijabetesne rane, hiruške rane i opekotine. Može se primjeniti i na rane locirane u bilo kojoj tjelesnoj šupljini (usta, nos ili uho), na koži i sluzokoži. Zahvaljujući redukciji mikrobiološkog sadržaja i stvaranju vlažne sredine u rani, pomaže organizmu da aktivira svoj mehanizam u procesu zarastanja rana.

- **SIGURNOST:** ne oštećuje tkivo, nije toksičan i ne iritira kožu, oči i grlo
- **ANTI-INFLAMATORNI EFEKAT**
- **PRIPREMLJEN ZA UPOTREBU:** ne razblažuje se
- **STABILNOST:** rok trajanja je 60 dana nakon otvaranja
- **PH NEUTRALAN:** Ph od 6,2 do 7,8
- **EKOLOŠKI BEZBJEDAN:** nisu potrebne specijalne mjere odlaganja i uništavanja
- **VIŠESTRUKA PRIMJENA:** može se bez problema koristiti u kombinaciji sa ostalim antisepticima

SPEKTAR DJELOVANJA

MRSA - Staphylococcus aureus	Micrococcus luteus
VRE - Enterococcus faecalis	Proteus mirabilis
Staphylococcus aureus	Pseudomonas aeruginosa
Escherichia coli	Staphylococcus epidermidis
Acinetobacter baumannii	Staphylococcus haemolyticus
Bacteroides fragilis	Staphylococcus hominis
Candida albicans	Staphylococcus saprophyticus
Enterobacter aerogenes	Staphylococcus pyogenes
Enterococcus faecium	Serratia marcescens
Haemophilus influenzae	HIV-1
Klebsiella oxytoca	Influenza A
Klebsiella pneumoniae	Rhinovirus
	Human Corona Virus



Microdacyn Wound Care

Microdacyn antiseptični baktericidni rastvor / hidrogel

Osobine i indikacije:

Microdacyn Wound Care je superoksidisani rastvor / hidrogel natrijum-hipohlorita i hipohlorne kiseline kao aktivnih komponenti koje imaju lokalno antimikrobni efekat. Redukcijom velikog broja mikroorganizama u rani i kontrolom vlažnosti sredine, postiže se ubrzano zarastanje rana.

Microdacyn Wound Care se može široko primjenjivati u okviru sveobuhvatnog liječenja rana: debridman (čišćenje i previjanje rana); venske ulkuse; dijabetične ulkuse; dekubitalne promjene; opekotine I i II stepena; iritacije kože i sluzokože - infekcije, alergije, ekcemi; oderotine i posjekotine; rane locirane u bilo kojoj tjelesnoj šupljini kao što su usta, nos ili uho; post-operativne hiruške rane.

Rukovanje:

Microdacyn Wound Care je biokompatibilan za indikovanu upotrebu, ne iritira ljudsku kožu, oči ili grlo i ne povećava osjetljivost kože. Nisu potrebne posebne mjere opreza.

Čuvanje:

Microdacyn Wound Care treba čuvati u originalnom pakovanju, u zatvorenom prostoru, na sobnoj temperaturi (ne zamrzavati). Nije zapaljiv. Poslije upotrebe, pakovanje treba ponovo zatvoriti, prije skladištenja.

Stabilnost:

Dok se ne otvori, stabilnost i sterilnost Microdacyn Wound Care rastvora / hidrogela je sigurna do isteka roka (pogledati na boci godinu i mjesec isteka roka važnosti). Poslije otvaranja, upisati datum na boci na dijelu "Datum otvaranja". Stabilnost neiskorišćenog rastvora / hidrogela je do 60 dana od dana prvog otvaranja.

Uputstvo za upotrebu:

Microdacyn Wound Care rastvor / hidrogel je spreman za upotrebu bez prethodnog rastvaranja ili razrjeđivanja. Microdacyn Wound Care rastvor / hidrogel, se primjenjuje direktno na ranu. Koristiti Microdacyn Wound Care rastvor / hidrogel, svaki put kada se mijenja obloga za rane. Obilno kvašenje postojeće obloge Microdacyn Wound Care rastvorom će olakšati uklanjanje obloge sa rane.

Način upotrebe:

Rastvor:

- Dobro natopiti postojeći prevoj Microdacyn rastvorom, da se lagano odvoji sa rane.
 - Sterilnom kompresom (debrisoft kompresa) natopljenom Microdacyn rastvorom dobro očistiti ranu od sredine ka rubovima rane.
 - Novu sterilnu kompresu natopiti Microdacynom i ostaviti 5 do 10 minuta na rani.
 - Direktno našpricati ranu Microdacyn rastvorom.
 - Postaviti prevoj na ranu i fiksirati ga.
- Navedeni postupak sprovoditi onoliko puta u danu i toliko dugo, koliko to ljekar ili medicinsko osoblje smatra za neophodnim i opravdanim, do zaliječenja rane.

Hidrogel:

- Dobro natopiti postojeći prevoj Microdacyn rastvorom, da se lagano odvoji sa rane.
- Ranu očistiti Microdacyn rastvorom i posušiti.
- Nanijeti tanak sloj Microdacyn hidrogela na ranu i oko rane (ne deblje od 2 do 5 mm) u zavisnosti od dubine rane ili veličene opekotine.
- Ponavljati postupak do 2 puta dnevno i onoliko dugo koliko ljekar i medicinsko osoblje smatra za potrebnim do zaliječenja rane.
- Postaviti prevoj na ranu i fiksirati ga.

Napomene:

Koristiti uvijek svjež Microdacyn Wound Care rastvor / hidrogel u neoštećenom pakovanju pridržavajući se uputstva za upotrebu. Prijaviti bilo kakve neželjene reakcije medicinskom osoblju. Ne upotrebljavati ukoliko se javi hipersenzitivnost na proizvod. Ne upotrebljavati za injekcije ili konzumiranje. Držati dalje od dohvata i vidokruga djece.

Odlaganje:

Microdacyn Wound Care rastvor / hidrogel nije otrovan i siguran je za okolinu. Nisu potrebni posebni uslovi za uništavanje.

Sastav:

1. Rastvor - elektrolizovana voda (H₂O), natrijum hlorid (NaCl), aktivne komponente: natrijum hipohlorit (NaOCl) i hipohlorna kiselina (HOCl).
2. Hidrogel – elektrolizovana voda (H₂O), natrijum hlorid (NaCl), natrijum magnezijum fluorosilikat (gelirajući agens), natrijum fosfat (puffer), aktivne komponente: natrijum hipohlorit (NaOCl) i hipohlorna kiselina (HOCl).

Proizvođač:

OCULUS INNOVATIVE SCIENCES, SAD/Meksiko,
www.oculusis.com

Dobrobiti primjene Microdacyn Wound Care



Uvoznik i distributer za BiH

SI-MEDIS

medicinska sredstva i oprema

Frana Supila 7, Banja Luka
T: 065/533-128, 065/464-717

T/F: 051/492-272

E: simedisbl@gmail.com